



E.S.V.I

**Vetolabo**

Partenaire de vos recherches

## Tatoueur électrique 230 Volts

### ALIMENTATION

Le tatoueur fonctionne en très basse tension obtenue à partir du bloc d'alimentation 230V/12V (**BT**), l'interrupteur en 12 V est à pression à pied.

### RÉGLAGE DU DÉBIT D'ENCRE

Visser l'embout **EM** jusqu'à ce qu'apparaisse une résistance.

Introduire alors quelques gouttes d'encre par orifice **O** en tenant l'appareil obliquement, l'embout dirigé vers le bas.

Fermer l'orifice en faisant glisser l'obturateur **OB**

Faire fonctionner l'appareil en le tenant en position verticale et dévisser légèrement l'embout jusqu'à ce que l'encre apparaisse.

NOTA : LORSQUE L'APPAREIL CONTIENT DE L'ENCRE, GARDER TOUJOURS LES AIGUILLES DIRIGÉES VERS LE BAS.

### RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE PÉNÉTRATION

Après avoir débloqué le contre-écrou **CE** en le vissant tout en maintenant le manchon **MA**, régler en vissant le manchon **MA** pour augmenter ou en le dévissant pour diminuer.

Un tour complet correspond à une variation de pénétration de 1mm.

Bloquer le contre écrou **CE**.

### NETTOYAGE

Après utilisation, ouvrir l'obturateur **OB**, desserer l'embout **EM** pour permettre à l'excédent d'encre de s'écouler le mécanisme étant en fonctionnement.

Ne pas laisser d'encre dans l'appareil.

Le nettoyage complet s'effectue par démontage (voir ci-après).

Lors du rangement de l'appareil, veiller à ce que les aiguilles ne dépassent pas de l'embout. Ceci peut-être obtenu, soit en arrêtant l'appareil en position aiguilles rentrées (donner des impulsions sur l'interrupteur jusqu'à ce que les aiguilles s'arrêtent dans la bonne position), soit en dévissant le manchon ou l'embout.



E.S.V.I

# Vetolabo

Partenaire de vos recherches

## DÉMONTAGES AUTORISÉS

Pour changer le faisceau d'aiguilles **CTA**, desserrer l'embout **EM**, débloquer le contre-écrou **CE** puis dévisser le manchon et retirer axialement l'ensemble : manchon + embout.

Tirer alors axialement sur le faisceau d'aiguilles (qui est emboîté et non vissé) et le remplacer.

Lors du remontage, visser l'embout sur le manchon, mais sans serrer, puis enfile le manchon autour des aiguilles bien dans l'axe et visser le manchon sur la carcasse **CAR**

Rebloquer le contre-écrou

NOTA : NE JAMAIS REMONTER LE MANCHON SUR LE MÉCANISME AVEC L'EMBOUIT SERRE, LES AIGUILLES NE POUVANT PAS ALORS TRAVERSER LE DIAPHRAGME.

## CONSEILS POUR L'UTILISATION

Bien raser la partie à tatouer et l'enduire légèrement de vaseline. Le réglage de la profondeur de pénétration doit être tel que les aiguilles dépassent de 1.5mm minimum. La pénétration réelle est alors d'1mm environ, compte tenu de l'élasticité de la peau. Tendre la peau. Tenir le tatoueur verticalement et le déplacer pour écrire (procéder par trait continu et non par point). Essuyer les bavures d'encre sur la peau. Le tatouage doit alors apparaître en noir. Si le trait est rouge, c'est que la peau n'a pas été suffisamment tendue ou que la profondeur de pénétration est insuffisante. Repasser alors sur les parties mal tatouées en augmentant la profondeur de pénétration.

Ne pas hésiter à changer les aiguilles dès que l'une d'elles est émoussée : une aiguille émoussée repousse la peau et empêche donc les autres aiguilles de pénétrer.

Pour les très petits animaux, il est possible d'obtenir un trait encore plus fin avec un faisceau de 3 aiguilles seulement (casser la 4ème aiguille à la base de la soudure).



Code de référence de pièces de rechange :

L'APPAREIL EST GARANTI 2 ANS POUR UN USAGE CONFORME A SON UTILISATION.

ESVI VETOLABO

6 Avenue des Andes – Mini-Parc Bâtiment 8 – ZA de Courtabœuf - 91940 Les Ulis cedex

Tél +33 (0)1 60 11 53 44 – Portable +33(0)7 64 36 98 35

91940 Les Ulis cedex

Franck Paolicelli